

Návod k použití

CS



Wrabbit

Tec Com
Medizintechnik

1 Účel použití

TECOtherm Wrabbit slouží jako jednorázový výrobek k ochraně před poporodní ztrátou tepla a vlhkosti u novorozenců a předčasně narozených dětí.

2 Základní informace



Výrobek se skládá z fólie P UR bez obsahu latexu, DEHP a BPA s fleecovou vložkou.



"Velikosti výrobku v závislosti na váze pacienta:
S < 1000 g; M = 1000 g – 2000 g; L > 2000 g
Při nedodržení může dojít ke snížení účinnosti.



Pouze ke klinickému použití.



Neprovádět úpravu, nepoužívat opakovaně.



Žádný přímý kontakt s otevřenými ranami nebo poškozenou pokožkou.



Nebezpečí ucpaní dýchacích cest.
Zkontrolovat správnou polohu zdravotnického výrobku.
Dýchací cesty nechat volné.



Aplikace může vést k hypertermii.
Monitorování pacienta!



Zdravotnický výrobek nepoužívat k přenášení.



Pokud dojde v souvislosti s výrobkem ke vzniku závažné mimořádné události, kontaktujte výrobce a příslušný úřad.



Nesterilní zdravotnický prostředek.



Výhradně k jednorázovému použití.



Před použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozený, pokud je poškozený obal, výrobek zlikvidujte.



Chránit před ostrými předměty, hrozí nebezpečí poškození.




Skladovat v suchu a ve tmě.



Skladovat při pokojové teplotě.

3 Použití

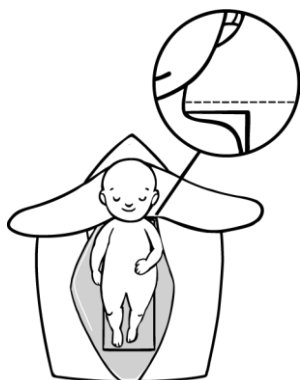


1. krok:

Rozprostřít výrobek.

Položit novorozence na rouno rameny pod ramenní šev.


CS

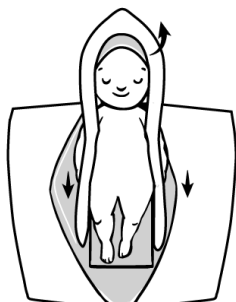

2. krok:

Kapuci na hlavě ohnout a umístit strany podél obličeje směrem dolů.

Dbejte na to, aby zůstala oblast krku volná.

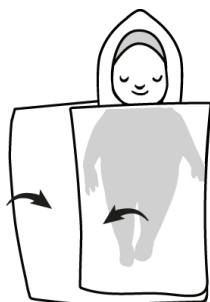

3. krok:

Postupně přehýbat vnější strany.

Podle potřeby novorozence přebalit.

4 Likvidace

Po použití likvidujte jako klinický odpad.



Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal, Germany
+49 (0) 345 1205 204
www.tcm.gmbh