

# Gebrauchsanweisung Instructions for Use



# Wrabbit

DE / EN













**Tec Com**  
Medizintechnik

## 1 Verwendungszweck / Intended Use

Das TECOtherm Wrabbit dient als Einwegprodukt zum Schutz vor postnatalem Wärme- und Feuchtigkeitsverlust von Früh- und Neugeborenen.

The TECOtherm Wrabbit is designed as a disposable device to help prevent postnatal heat and water loss in premature and newborn infants.

## 2 Grundlegende Hinweise / Basic information

	Das Produkt besteht aus PUR-Folie, frei von Latex, DEHP und BPA mit einer Vlieseinlage.	The product is made of PUR film, is latex-free, DEHP-free and BPA-free with a fleece lining.
	"Produktgrößen in Abhängigkeit des Patientengewichts: S < 1000 g; M = 1000 g – 2000 g; L > 2000 g Bei Nichtbeachtung möglicherweise eingeschränkte Leistungsfähigkeit.	"Product sizes based on the patient's weight: S < 1000 g; M = 1000 g – 2000 g; L > 2000 g Failure to follow these instructions may result in impaired performance.
	Nur für den klinischen Gebrauch.	Only for clinical use.
	Keine Aufbereitung oder Mehrfachanwendung.	Do not reprocess or reuse.
	Kein direkter Kontakt bei offenen Wunden oder nicht intakter Haut.	Do not use in direct contact with open wounds or skin that is not intact.
	Gefahr durch Verschließen der Atemwege. Überprüfen des korrekten Sitzes des Medizinprodukts. Atemwege frei lassen.	Danger of obstructing the airways. Verify the medical device is correctly fitted. Keep the airways clear.
	Die Anwendung kann zu einer Hyperthermie führen. Überwachung des Patienten!	Use may result in hyperthermia. Monitor the patient!
	Medizinprodukt nicht als Tragehilfe verwenden.	Do not use the medical device to carry the patient.
	Treten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auf, dann melden Sie diese bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde.	If serious incidents occur in connection with the product, please report these to the manufacturer and the responsible authorities.
	Nicht steriles Medizinprodukt.	Non-sterile medical device.
	Ausschließlich zum Einmalgebrauch.	For single use only.
	Vor der Verwendung auf Beschädigung prüfen, bei beschädigter Verpackung verwerfen.	Check for damage before use, discard if packaging is damaged.
	Von scharfen Gegenständen fernhalten, Beschädigungsgefahr.	Keep away from sharp objects, as there is a risk of damage.
	Trocken und dunkel lagern.	Store in a dry and dark location.
	Bei Raumtemperatur lagern.	Store at room temperature.


### 3 Anwendung / Application



Schritt 1 / Step 1:

Produkt ausbreiten.  
Neugeborenes mit den Schultern unterhalb der Schulternaht auf das Vlies legen.


Lay out the product.  
Place the newborn on the fleece with their shoulders below the shoulder seam.

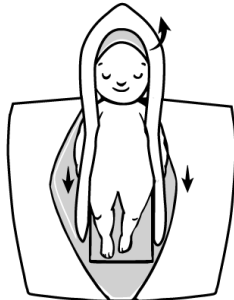

Schritt 2 / Step 2:

Kapuze am Kopf umschlagen und die Seiten am Gesicht entlang nach unten platzieren.  
Achten Sie darauf, den Halsbereich freizulassen.

Fold the hood over the head and bring the sides down along the face.  
Take care to leave the neck region free.

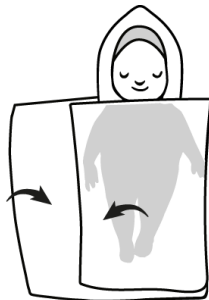

Schritt 3 / Step 3:

Die Außenseiten nacheinander umschlagen.  
Neugeborenes bei Bedarf pucken.

Fold the outer sides over one after the other.  
Swaddle the newborn baby if necessary.

### 4 Entsorgung / Disposal

Nach Gebrauch als klinischen Abfall entsorgen.

Dispose of as clinical waste after use.

# Distributor

**International Biomedical**

[www.int-bio.com](http://www.int-bio.com)

 **international  
BIOMEDICAL®**

**USA / SAU / Middle East**

**MedCare Visions GmbH**

[www.mcv-group.de](http://www.mcv-group.de)

 **MED CARE®  
VISIONS**

**Worldwide**

(except USA / SAU / Middle East)

**Tec Com**  
  
**Medizintechnik**

**Tec Com Medizintechnik GmbH**  
Am Krümmling 1  
06184 Kabelsketal, Germany  
+49 (0) 345 1205 204  
[www.tcm.gmbh](http://www.tcm.gmbh)