



Tec Com
Medizintechnik

Gebrauchsanweisung
Instructions for Use
Инструкции за употреба
Návod k použití
Brugsanvisning
Οδηγίες χρήσης
Instrucciones de uso
Kasutusjuhend
Käyttöohje
Mode d'emploi
Upute za uporabu
Használati utasítása
Istruzioni per l'uso
Naudojimo instrukcija
Lietošanas instrukcija
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Instrukcja użytkowania
Instruções de utilização
Instrucțiuni de utilizare
Návod na použitie
Navodila za uporabo
Bruksanvisning
Kullanma Kılavuzu
دليل الاستخدام

١ الغرض من الاستخدام

كمنتج للاستخدام لمرة واحدة TECOthem Wrabbit يتم استخدام الجهاز الطبي للحماية من فقدان الحرارة والرطوبة بعد الولادة عند الأطفال المبتسرين (ولادة مبكرة) وحديثي الولادة

٢ ملاحظات أساسية

المنتج مصنوع من طبقة PUR خالية من اللاتكس و BPA و DEHP مع حشوة من الصوف أحجام المنتج حسب وزن المريض :	
صغير < ١٠٠٠ جرام ، متوسط = ١٠٠٠ جرام إلى ٢٠٠٠ جرام ، كبير > ٢٠٠٠ جرام قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى ضعف الأداء .	
للاستخدام السريري فقط .	
لا تتم بإعادة المعالجة أو إعادة الاستخدام .	
لا تستخدم في اتصال مباشر مع الجروح المفتوحة أو الجلد غير السليم	
خطر انسداد الشعب الهوائية .	
تحقق من تركيب الجهاز الطبي بشكل صحيح .	
اترك الممرات الهوائية خالية	
قد يؤدي الاستخدام إلى ارتفاع الحرارة .	
مراقبة المريض !	
لا تستخدم الجهاز الطبي لحمل المريض .	
في حالة وقوع حوادث خطيرة تتعلق بالمنتج، يرجى الإبلاغ عنها إلى الشركة المصنعة والسلطة المسؤولة	
جهاز طبي غير معقم .	
للاستخدام الفردي فقط .	
تحقق من عدم وجود تلف قبل الاستخدام، وتخلص منه في حالة تلف العبوة	
يُحفظ بعيداً عن الأشياء الحادة، خطر التلف .	
تخزينها في مكان جاف ومظلم .	
احفظه في درجة حرارة الغرفة .	

٣ الاستخدام

الخطوة الأولى افرش و مد المنتج ضع المولود الجديد على الصوف مع وضع كتفيه أسفل خط الكتف	
الخطوة الثانية قم بغطي الغطاء فوق الرأس واسحب الجوانب للاسفل على طول الوجه تأكد من ترك منطقة الرقبة حرة	
الخطوة الثالثة قم بغطي الجوانب الخارجية واحدة تلو الأخرى لف المولود الجديد بقماشة (بقماط حديثي الولادة) إذا لزم الأمر يمكن الوصول إلى المريض في أي وقت دون الإضرار بالمنتج يمكن إخراج المجسمات من نهاية القدم قبل طي الجزء الخارجي	
يمكن الوصول إلى القنية الوريدية الساكنة في أي وقت عن طريق فتحها على جانب واحد دون المساس بالحماية الحرارية للمريض	

٤ التخلص من المنتج

التخلص منها ككفايات سريرية بعد الاستخدام

يمكنك العثور على تعليمات الاستخدام بلغتك المحلية عبر الإنترنت على :

www.service.tcm.gmbh/ifus/





Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal, Germany
+49 (0) 345 1205 204
www.tcm.gmbh

Datei: IFU Wrabbit

Version: 3 / 20.10.2023



Distributor
LOGO

Ihren zuständigen Distributor finden sie Online unter:

Your relevant distributor can be found online at:

Вашия дистрибутор можете да намерите онлайн на:

Vašeho distributora najdete online na adrese:

Du finner din distributør online under:

Τον αρμόδιο διανομέα σας θα τον βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Para encontrar su distribuidor online, consulte en:

Oma vastutava turustaja leiata internetist aadressilt:

Löydät asianomaisen jälleenmyyjän verkosta osoitteesta:

Vous trouverez votre distributeur compétent en allant sur :

Svogo odgovornog distributera možete pronaći online na:

Az Ön illetékes forgalmazóját az alábbi internetes oldalon találja:

Il distributore competente per la vostra area è disponibile online all'indirizzo:

Atsakingą gaminio platintoją galite rasti internete adresu:

Jūsu valstī atbildīgais izplatītājs atrodams tīmekļa vietnē:

Uw distributeur vindt u online op:

Du finner din ansvarlige distributør online på:

Swojego dystrybutora mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:

Pode encontrar o seu distribuidor online em:

Puteți găsi online distribuitorul responsabil la adresa:

Vášho distribútora nájdete online na adrese:

Svojega pristojnega distributerja najdete na spletu na naslovu:

Du hittar din ansvariga distributør online på:

Yetkili distribütörünüzü online olarak burada bulabilirsiniz:

يمكنك العثور على الموزع المسؤول الخاص بك عبر الإنترنت على:



tcm.gmbh/en/distribution/