

Инструкции за употреба

VENOray

Návod k použití



1 Предназначение

Venoray е преносим светодиоиден източник на светлина за локализиране на кръвни съдове в крайниците на новородени, кърмачета и малки деца.

2 Основни указания



Venoray се състои от полиамид и не съдържа латекс, DEHP и BPA.



Почистване с мек дезинфектант съгласно инструкцията за почистване на производителя на дезинфектанта.



Захранва се от 2 x AAA батерии.



Преди употреба проверете за повреди и правилно функциониране.



Само за клинична употреба.



Приложение само върху крайниците.



Да се използва само за краткотраен контакт с кожата.



Не гледайте директно в източника на светлина и не го насочвайте към главата на пациента. Указание: Може да доведе до ограничение на зрението.



Ако във връзка с употребата на продукта възникнат сериозни инциденти, моля, съобщете за това на производителя и отговорния орган.



Нестерилен медицински продукт.



Съхранявайте на сухо място.



Съхранявайте при стайна температура.

1 Účel použití

Venoray je přenosný LED světelný zdroj používaný k lokalizaci krevních cév v končetinách předčasně narozených dětí, kojenců a malých dětí.

2 Základní informace



Venoray je vyroben z polyamidu, neobsahuje latex, DEHP a BPA.



Čištění zředěným dezinfekčním prostředkem podle návodu k čištění od výrobce dezinfekčního prostředku.



Provoz na baterie 2x AAA



Před použitím zkontrolujte poškození a funkčnost.



Pouze ke klinickému použití.



Používejte pouze na končetiny.



Používejte pouze pro krátkodobý kontakt s pokožkou.



Nedívejte se přímo do zdroje světla ani jím nemířte na hlavu pacienta. Upozornění: Může vést ke zhoršení zraku.



Pokud dojde v souvislosti s výrobkem ke vzniku závažné mimořádné události, kontaktujte výrobce a příslušný úřad.




Nesterilní zdravotnický prostředek.



Skladujte na suchém místě.



Skladovat při pokojové teplotě.

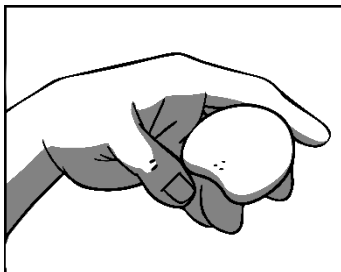

Позиционирайте китката на кърмачето върху външния ръб на Venoray над светодиодите.

При това пръстите могат да се фиксират над ръба.

Опънете кожата върху горната част на китката с палец и показалец.

Изхвърлете изтощените батерии съгласно инструкциите на производителя.
Изхвърлете повредения уред в клиничните отпадъци.



Umístěte ruku kojence na vnější okraj Venoray nad LED.

Prsty lze přitom zafixovat přes okraj.

Palcem a ukazováčkem napněte kůži na hřbetu ruky.

Vybité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce.

Vadný přístroj likvidujte jako klinický odpad.