



1 Anvendelsesformål

Venoray er en bærbar LED-lyskilde til lokalisering af blodkar i lemmerne hos for tidligt fødte børn, spædbørn og småbørn.

2 Grundlæggende oplysninger

i

Venoray består af polyamid, er fri for latex, DEHP og BPA.

i

Rengør med et mildt desinfektionsmiddel i henhold til desinfektionsmiddelproducentens rengøringsanvisninger.

i

Batteridrevet 2 x AAA



Kontrollér, at produktet er ubeskadiget og fungerer korrekt, inden det tages i brug.



Kun egnet til klinisk brug.



Må kun anvendes på ekstremiteter.



Må kun have kortvarig hudkontakt.



Kig ikke direkte ind i lyskilden og ret den ikke mod patientens hoved. Bemærk: kan nedsætte synsevnen.



Kontakt producenten og den ansvarlige myndighed, hvis der i sammenhæng med produktet opstår alvorlige situationer.



Produktet er ikke et sterilt medicinsk produkt.



Opbevares tørt.

Opbevares ved stuetemperatur.

1 Σκοπός χρήσης

To Venoray είναι μια φορητή πηγή φωτός LED για τον εντοπισμό αιμοφόρων αγγείων στα μέλη πρόωρων νεογνών, βρεφών και νηπίων.

2 Βασικές υποδείξεις

i

To Venoray αποτελείται από πολυαμίδιο, χωρίς λατέξ, DEHP και BPA.

i

Καθαρισμός με ένα ήπιο απολυμαντικό σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού του παραγωγού του απολυμαντικού.

i

Λειτουργεί με 2 μπαταρίες AAA



Πριν από τη χρήση ελέγξτε το για ζημιές και για την ικανότητα λειτουργίας.



Μόνο για κλινική χρήση.



Εφαρμογή μόνο στα άκρα.



Χρήση μόνο για σύντομη επαφή με το δέρμα.



Μην κοιτάζετε απευθείας τη φωτεινή πηγή, και μην την κατευθύνετε προς το κεφάλι του ασθενούς. Υπόδειξη: Ενδέχεται να προκαλέσει περιορισμό της όρασης.



Εάν σε σχέση με το προϊόν προκύψουν σοβαρά περιστατικά, τότε θα πρέπει να τα δηλώσετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή.




Μη αποστειρωμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν.



Να φυλάσσεται σε στεγνό μέρος.

Να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου.

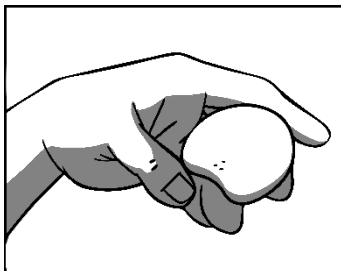

Positioner spædbarnets hånd på yderkanten af Venoray over LED'erne.


Derved er det muligt at fiksere fingrene over kanten.

Stram huden på håndryggen med tommelfinger og pegefinger.

Opbevaring

Bortskaf tomme batterier som oplyst af producenten.

Bortskaf et defekt apparat sammen med klinisk affald.

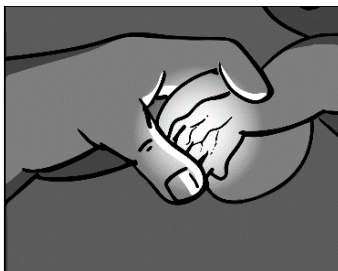

Τοποθετήστε το χέρι του βρέφους στην εξωτερική ακμή του Venoray πάνω από τις LED.

Μέσω της ακμής μπορούν να στερεωθούν τα δάχτυλα.

Με τον αντίχειρα και τον δείκτη, τεντώστε το δέρμα της ράχης του χεριού.

Διάθεση

Απορρίψτε τις κενές μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Απορρίψτε την ελαττωματική συσκευή στα κλινικά απόβλητα.