

Instrucciones de uso

VENOray

Kasutusjuhend



1 Finalidad de uso

Venoray es un dispositivo luminoso led portátil que sirve para localizar vasos sanguíneos en las extremidades de bebés prematuros, bebés y niños pequeños.

2 Información básica



Venoray está fabricado con poliamida sin látex, DEHP ni BPA.



Se limpia con un producto desinfectante suave siguiendo las indicaciones de limpieza del fabricante del desinfectante.



Funciona con 2 pilas AAA.



Comprobar antes de su uso que el dispositivo funciona correctamente y no presenta ningún daño ni desperfecto.



Solo para uso clínico.



Utilizar únicamente en las extremidades.



El dispositivo solo puede estar brevemente en contacto con la piel.



No mirar nunca directamente a la fuente de luz ni apuntar a la cabeza del paciente. Observación: Podría provocar problemas de visión.



Si se produjeran incidentes graves en relación con el producto, le rogamos que lo ponga en conocimiento del fabricante y de la autoridad competente.



Producto sanitario no esterilizado.



Mantener en un lugar seco.



Almacenar a temperatura ambiental.

1 Kasutusotstarve

Venoray on kaasaskantav LED valgusallikas enneaegsete laste, imikute ja väikelaste jäsemetes olevate veresoonte asukoha määramiseks.

2 Olulised märkused



Venoray koosneb polüamiidist, ei sisalda lateksit, DEHP-d ja BPA-d.



Puhastage õrna desinfitseerimisvahendiga vastavalt desinfitseerimisvahendi tootja puhastusjuhuisele.



Patareitoitega 2 × AAA



Enne kasutamist kontrollige kahjustuste esinemist ja toimivust.



Kasutamiseks vaid kliinilisel otstarbel.



Kasutatakse ainult jäsemete peal.



Rakendatakse ainult lühiajaliseks nahakontaktiks.



Ärge vaadake otse valgusalikasse ega suunake seda patsiendi pea poole. Märkus: võib põhjustada nägemisvõime halvenemist.



Kui seoses tootega ilmneb tõsisid häireid, andke sellest palun teada tootjale ja vastutavale asutusele.




Ei ole steriilne meditsiinitoode.



Hoidke kuivas kohas.




Hoidke toatemperatuuril.

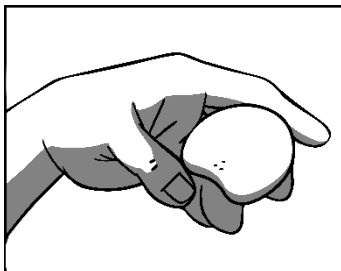

Posicionar la mano del bebé sobre los ledes del borde exterior de Venoray.

De esta forma, los dedos pueden mantenerse sujetos en el borde.

Extender el dorso de la mano del bebé con los dedos pulgar e índice.

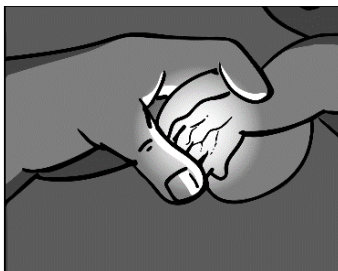

Paigutage imiku käsi Venoray välisservale LED lampide kohale.

Sõrmed saab seejuures üle serva fikseerida.

Pingutage käeselja nahka pöidla ja nimetissõrme abil.

Las pilas gastadas deben desecharse según las indicaciones del fabricante.

El dispositivo debe desecharse en un contenedor de residuos clínicos al final de su vida útil.

Korraldage tühjade patareide jäätmekäitlus vastavalt tootja poolt esitatud teabele.

Korraldage defektse seadme jäätmekäitlus kliiniliste jäätmete hulgas.