

Käyttöohje

VENOray

Mode d'emploi



1 Käyttötarkoitus

Venoray on kannettava LED-valonlähde verisuonten paikantamiseen vastasyntyneiden, imetyksikäisten ja pienten lasten raajoissa.

2 Yleisohjeet



Venoray on valmistettu polyamidista ja on lateksiton, DEHP- ja BPA-vapaa.



Puhdistaminen tapahtuu miedolla desinfiointiaineella aineen valmistajan puhdistusohjeen mukaisesti.



Paristokäyttöinen, 2 x AAA



Tarkista kunto ja toiminta ennen käyttöä.



Vain kliniseen käyttöön.



Saa käyttää vain ääreisverenkiertoon.



Vain lyhytaikaiseen ihokontaktiin.



Älä katso suoraan valonlähteeseen tai kohdista sitä potilaan kasvoihin. Huomio: voi heikentää näkökykyä.



Jos tuotteen käytössä esiintyy vakavia vaaratilanteita, ilmoita niistä valmistajalle ja vastaavalle viranomaiselle.



Steriloimaton lääkinnällinen laite.



Varastoi kuivana.



Säilytettävä huoneenlämmössä.

1 Usage prévu

Venoray est une source lumineuse LED mobile, utilisée pour localiser les vaisseaux sanguins dans les membres des prématurés, des nourrissons et des enfants en bas-âge.

2 Indications fondamentales



Venoray se compose de polyamide, et est exempt de Latex, de DEHP et de BPA.



Nettoyage avec un désinfectant doux, selon les consignes de nettoyage du fabricant du désinfectant.



Fonctionne avec 2 piles AAA



Avant utilisation, vérifier la fonctionnalité et la présence de dommages sur l'article.



Convient à un usage clinique uniquement.



S'utilise uniquement sur les extrémités.



Utilisation uniquement en cas de bref contact avec la peau.



Ne pas regarder directement dans la source lumineuse, ou la diriger vers la tête du patient. Remarque : cela peut entraîner une réduction des capacités visuelles.



Si des incidents graves se produisent en lien avec le produit, veuillez les signaler au fabricant et aux autorités compétentes.




Dispositif médical non stérile.



Conserver l'article à l'état sec.



À conserver à température ambiante.

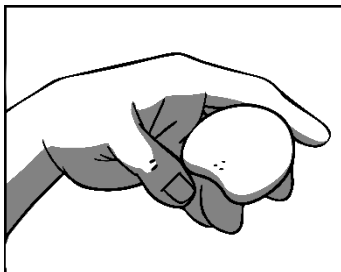

Aseta imetysikäisen käsi Venorayn ulkoreunalle LED-valojen päälle.

Näin sormet voivat kiinnittyä reunan ympäri.

Pidä kiinni kämmenselästä peukalollasi ja etusormellasi.



Positionner la main de l'enfant sur le bord extérieur du Venoray, au-dessus des LED.

À cet effet, les doigts peuvent être immobilisés sur le bord.

Tendez la peau du dos de la main avec le pouce et l'index.

Hävittäminen

Hävitä tyhjät paristot valmistajan ohjeen mukaisesti.

Hävitä viallinen laite klinisen jätteen seassa.

Élimination

Jeter les piles usagées conformément aux consignes du fabricant.

Jeter l'appareil défectueux avec les déchets cliniques.