

Upute za uporabu

VENOray

Használati utasítása



1 Svrrha uporabe

Venoray je prijenosni LED izvor svjetla koji se koristi za pronalaženje krvnih žila u udovima prijevremeno rođene djece, dojenčadi i male djece.

2 Osnovne napomene



Venoray se sastoji od poliamida, bez lateksa, DEHP-a i BPA-e.



Čišćenje blagim dezinfekcijskim sredstvom prema uputama za čišćenje proizvođača dezinfekcijskog sredstva.



Rad na baterije 2 x AAA



Prije uporabe provjerite ima li oštećenja i radi li.



Samo za kliničku upotrebu.



Uporaba samo na ekstremitetima.



Primjena samo za kratkotrajni kontakt s kožom.



Nemojte gledati izravno u izvor svjetlosti niti ga usmjeravati prema pacijentovoj glavi. Napomena: može uzrokovati oštećenje vida.



U slučaju da vezano uz proizvod dođe do ozbiljnih incidenata, molimo vas da ih prijavite proizvođaču i nadležnom tijelu.



Nesterilni medicinski proizvod.



Čuvati na suhom mjestu.

Čuvati na sobnoj temperaturi.

1 Felhasználási cél

A Venoray egy hordozható LED-es fényforrás a koraszülöttek, csecsemők és kisgyermekek vénáinak azonosítására.

2 Alapvető utasítások



A Venoray poliamidból készült, latex-, DEHP- és BPA-mentes.



Enyhe fertőtlenítőszerrel tisztítsa, a fertőtlenítőszer gyártójának tisztítási útmutatója szerint.



2 db AAA elemmel működik



Használat előzze az esetleges sérüléseket és a működést.



Csak klinikai használatra.



Csak a végtagokon használja.



Használat közben csak rövid ideig érintkezhet a bőrrel.



Ne nézzon közvetlenül a fényforrásba, és ne irányítsa azt a páciens fejére. Tudnivaló: A látóképesség korlátozásához vezethet.



Ha a termékkel kapcsolatban súlyos problémákat észlel, kérjük, jelezze azokat a gyártónak, valamint az illetékes hatóságnak.




Nem steril orvosi eszköz.



Száraz helyen tárolandó.

Szobahőmérsékleten tárolandó.

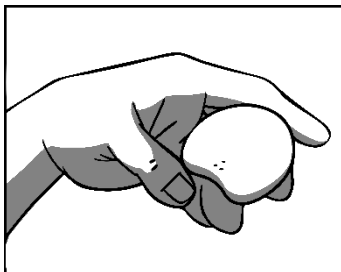

Postavite ruku dojenčeta na vanjski rub uređaja Venoray iznad LED dioda.

Prsti se pri tome mogu učvrstiti preko ruba.

Palcem i kažiprstom zategnite kožu na stražnjoj strani šake.

Odlaganje

Prazne baterije zbrinite prema uputama proizvođača.

Zbrinite neispravan uređaj u klinički otpad.



Helyezze a csecsemő kezét a Venoray külső élére, a LED-ek fölé.

Itt az ujjak az élen rögzíthetők.

A hüvelyk- és mutatóujjával feszítse meg a bőrt a kézfejen.

Selejtezés

A lemerült elemeket a gyártó utasításai szerint ártalmatlanítsa.

A meghibásodott készüléket a klinikai hulladékkal együtt ártalmatlanítsa.