

Istruzioni per l'uso

VENOray

Naudojimo instrukcija



1

Scopo d'uso

Venoray è una fonte di luce LED portatile per localizzare i vasi sanguigni negli arti di neonati prematuri, neonati e bambini piccoli.

2

Avvertenze fondamentali



Venoray è in poliammide, privo di lattice, DEHP e BPA.

Pulire con un disinfettante delicato secondo le istruzioni di pulizia del produttore del disinfettante

Funzionamento a batteria 2 x AAA



Prima dell'uso verificare che non siano presenti danni e che funzionino.



Solo per uso clinico.



Utilizzare solo sulle estremità.



Usare solo per un breve contatto con la pelle.



Non guardare direttamente la fonte di luce e non puntarla sulla testa del paziente. Nota: può causare danni alla vista.



Se si verificano incidenti gravi utilizzando il prodotto, si prega di segnalarli al produttore e all'autorità competente.



Prodotto medico non sterile.



Conservare in un luogo asciutto.



Conservare a temperatura ambiente.

1

Naudojimo paskirtis

„Venoray“ yra nešiojamas LED šviesos šaltinis, naudojamas neišnešiotų kūdikių, kūdikių ir mažų vaikų kraujagyslėms galūnėse nustatyti.

2

Pagrindiniai nurodymai



„Venoray“ yra pagamintas iš poliamido, be latekso, DEHP ir BPA.

Valyti švelnia dezinfekavimo priemone, pagal dezinfekavimo priemonės gamintojo valymo instrukcijas.
Veikia su 2 x AAA tipo baterijomis



Prieš naudojant patikrinti, ar nėra apgadinimo požymių ir jo funkcionalumą.



Skirtas tik klinikiniam naudojimui.



Naudoti tik ant galūnių.



Naudoti tik trumpalaikiam sąlyčiui su oda.



Nežiūrėti tiesiai į šviesos šaltinį ir nenukreipti jo į paciento galvą. Pastaba: gali pablogėti regėjimas.



Kilus su susijusiu produktu didelių problemų, praneškite apie tai gamintojui ir kompetentingai institucijai.




Nesterilus medicininis produktas.



Laikyti sausoje vietoje.



Laikykite kambario temperatūroje.

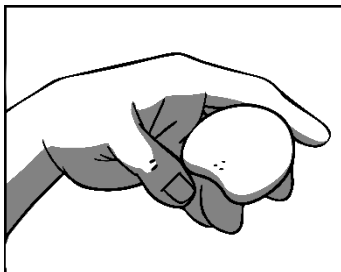

Posizionare la mano del neonato sul bordo esterno di Venoray sopra i LED.

Le dita possono essere fissate sopra il bordo.

Tendere la pelle del dorso della mano con il pollice e l'indice.

Smaltimento

Smaltire le batterie scariche secondo le istruzioni del produttore.

Smaltire il dispositivo difettoso tra i rifiuti clinici.



Padėkite kūdikio ranką ant išorinio „Venoray“ krašto virš šviesos diodų.

Pirštus galima užfiksuoti prie krašto.

Nykščiu ir rodomuoju pirštu patempkite plaštakos odą.

Šalinimo

Išsekusias baterijas išmesti pagal gamintojo nurodymus.

Sugedusį prietaisą išmesti į klinikinės atliekas.