

Lietošanas instrukcija

VENOray

Gebruiksaanwijzing



1 Lietošanas mērķis

"Venoray" ir pārnēsājams LED gaismas avots asinsvadu lokalizācijai priekšlaicīgi dzimušu bērnu, zīdaiņu un mazu bērnu ekstremitātēs.

2 Pamatnorādes



"Venoray" sastāv no poliamīda, nesatur lateksu, DEHP un BPA.



Tīrīšanai izmantojiet maigu dezinfekcijas līdzekli saskaņā ar dezinfekcijas līdzekļa ražotāja sniegtajām tīrīšanas norādēm.



Darbināms ar baterijām: 2 x AAA



Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta un vai tā darbojas.



Tikai klīniskai lietošanai.



Lietojiet tikai ekstremitātēm.



Lietojiet tikai īslaicīgā kontaktā ar ādu.



Neskatieties tieši gaismas avotā un nevērsiet to pret pacienta galvu. Norāde: var izraisīt redzes traucējumus.



Ja saistībā ar izstrādājumu notiek nopietni negadījumi, lūdz, ziņojiet par tiem ražotājam un atbildīgajām iestādēm.



Šis nav sterils medicīniskais izstrādājums.



Uzglabājiet sausā vietā.



Uzglabāt istabas temperatūrā.

1 Beoogd gebruik

De Venoray is een draagbare led-lichtbron voor het lokaliseren van bloedvaten in de ledematen van vroeggeboren baby's, zuigelingen en jonge kinderen.

2 Belangrijke aanwijzingen



De Venoray is gemaakt van polyamide, vrij van latex, DEHP en BPA.



Reiniging met een mild desinfectiemiddel volgens de reinigingsinstructies van de fabrikant van het desinfectiemiddel.



Werkt op batterijen (2 x AAA)



Voor gebruik op beschadiging en functionaliteit controleren.



Alleen voor klinisch gebruik.



Alleen gebruiken bij de extremiteiten.



Gebruik alleen voor kortstondig huidcontact.



Niet rechtstreeks in de lichtbron kijken en deze niet op het hoofd van de patiënt richten. Opmerking: kan leiden tot verminderd gezichtsvermogen.



Mochten er in combinatie met het product ernstige incidenten optreden, meld deze dan alstublieft bij de fabrikant en de bevoegde autoriteit.




Niet-steriel medisch product.



Droog bewaren.



Bij kamertemperatuur bewaren.

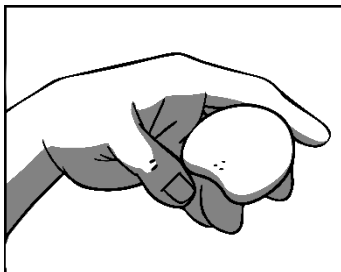

Novietojiet zīdaiņa plaukstu pie "Venoray" ārējās malas virs LED diodēm.

To darot, pirkstus var nofiksēt pāri malai.

Nostiepiet plauksta augšpusē ādu ar īkšķi un rādītājpirkstu.



Leg de hand van de baby op de buitenste rand van de Venoray boven de leds.

De vingers kunnen daarbij om de rand worden gefixeerd.
Span de huid op de handrug met uw duim en wijsvinger.

Tukšās baterijas utilizējiet saskaņā ar ražotāja norādēm.

Bojātu ierīci utilizējiet klīniskajos atkritumos.

Leg de batterijen volgens de instructies van de fabrikant weggooien.

Het defecte apparaat via het klinische afval afvoeren.