

Instrucțiuni de utilizare

VENOray

Návod na použití



1

Scopul utilizării

Venoray este o sursă de lumină LED portabilă pentru localizarea vaselor de sânge din membrele nou-născuților, sugariilor și copiilor mici.

2

Indicații de bază



Venoray conține poliamidă, fără Latex, DEHP și BPA.



Curățare cu o soluție dezinfectantă neagresivă conform indicațiilor de curățare ale producătorului soluției dezinfectante.



Funcționare cu 2 x baterii AAA



Verificați înainte de utilizare, dacă prezintă deteriorări și este funcțională.



Doar pentru uz medical.



Utilizare numai la extremități.



Folosire numai pentru contactul de scurtă durată cu pielea.



Nu priviți direct în sursa de lumină sau nu o orientați spre capul pacientului. Indicație: Aceasta poate duce la limitarea capacității vizuale.



Dacă în legătură cu produsul apar incidente grave, vă rugăm să le comunicați producătorului și autorității responsabile.



Produs medical nesteril.



Păstrați-o în stare uscată.



Depozitați la temperatura camerei.

1

Účel použití

Venoray je přenosné LED světlo pro lokalizaci cív v končetinách předčasně narozených dětí, dojčat a batoliat.

2

Základné pokyny



Venoray je vyrobený z polyamidu a neobsahuje latex, DEHP a BPA.



Čistiť jemným dezinfekčným prostriedkom a postupovať podľa pokynov výrobcu dezinfekčného prostriedku.



Produkt je napájaný batériami 2 x AAA



Pred použitím skontrolovať ohľadom poškodení a funkčnosti.



Len na klinické použitie.



Použiť len na končatinách.



Použiť len na krátkodobý kontakt s pokožkou.



Nepozerať sa priamo do zdroja svetla a nesvietiť pacientovi priamo do tváre. Upozornenie: Môže dôjsť k obmedzeniu zraku.



Ak v súvislosti s výrobkom dôjde k závažným prípadom, oznámte ich prosím výrobcovi a príslušnému úradu.




Nesterilná zdravotnícka pomôcka.



Uchovávať na suchom mieste.



Skladujte pri izbovej teplote.

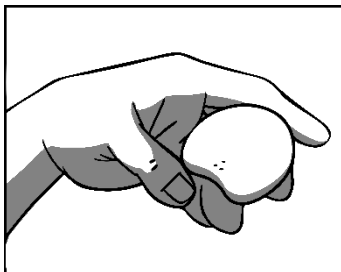

Poziționați mâna sugarului la marginea exterioară a lămpii Venoray peste LED-uri.

Degetele pot fi fixate peste margine.

Întindeți pielea dosului palmei cu degetul mare și degetul arătător.

Eliminare

Eliminați bateriile goale conform indicațiilor producătorului.

Eliminați aparatul defect la deșeurile clinice.



Umiesťnite ruku dojčat'a na vonkajšom rohu nad LED svetidlá Venorayu.

Prsty možno zafixovať na okraji.

Napnite pokožku chrbta ruky ukazovákom a palcom.

Likvidácia

Vybité batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu batérie.

Pokazený prístroj zlikvidujte ako klinický odpad.