

Navodila za uporabo

VENOray

Bruksanvisning



1 Namen uporabe

Venoray je prenosni vir svetlobe LED za lokaliziranje krvnih žil v okončinah novorojenčkov, dojenčkov in majhnih otrok.

2 Temeljni napotki



Venoray je sestavljen iz poliamida, ne vsebuje lateksa, DEHP in BPA.

Čiščenje z blagim razkužilom po navodilu proizvajalca razkužil glede čiščenja.

Deluje na baterije 2 x AAA



Pred uporabo preverite morebitne poškodbe in delovanje.



Primerno samo za klinično uporabo.



Uporaba samo na okončinah.



Uporaba samo za kratkotrajni stik s kožo.



Ne glejte neposredno v vir svetlobe in ga ne usmerjajte v bolnikovo glavo. Opozorilo: lahko povzroči omejitve vida.



Če se v zvezi z izdelkom pojavijo težji dogodki, prosimo, da te javite proizvajalcu in pristojnim organom.



Nesterilni medicinski izdelek.



Hranite na suhem.

Shranjujte pri sobni temperaturi.

1 Avsedd användning

Venoray är en bärbar LED-ljuskälla som används för att lokalisera blodkärl i armarna och benen på nyfödda, bebisar och småbarn.

2 Grundläggande anvisningar



Venoray består av polyamid och är fri från latex, DEHP och BPA.

Ska rengöras med ett mildt desinfektionsmedel enligt desinfektionsmedeltillverkarens rengöringsanvisningar.
Batteridrivna (2 x AAA)



Kontrollera före användning med avseende på skador och funktionalitet.



Endast för klinisk användning.



Får endast användas på extremiteter (armar och ben).



Endast avsedd för hudkontakt under en kort, begränsad tid.



Titta inte direkt in i ljuskällan och rikta den inte mot patientens huvud. Uppllysning: kan orsaka nedsatt syn.



Om allvarliga incidenter inträffar i samband med användningen av produkten, vänligen kontakta tillverkaren och den behöriga myndigheten.




Detta är inte en steril medicinsk produkt.



Ska förvaras på en torr plats.

Förvara i rumstemperatur.

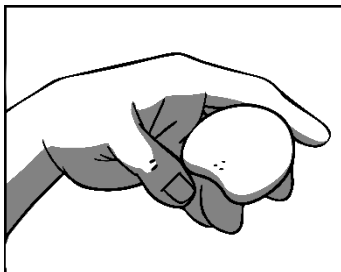

Namestite dojenčkovo dlan na zunanjem robu pripomočka Venoray nad lučkami LED.

Pri tem je mogoče prste pritrditi nad robom.

S palcem in kazalcem napnite kožo hrbtišča dlani.

Odstranjevanje

Prazne baterije zavrzite po navedbah proizvajalca.

Okvarjeno napravo odvrzite med klinične odpadke.



Positionera spädbarnets hand på Venoray-ljuskällans ytterkant, över LED-lamporna.

På så sätt kan fingrarna fixeras över kanten.

Sträck handryggens hud med tummen och pekfingeret.

Avfallshantering

Lämna tomma batterier till avfallshantering enligt tillverkarens anvisningar.

Om enheten är defekt ska den lämnas till avfallshantering tillsammans med det kliniska avfallet.