

Kullanma Kılavuzu

VENOray



1

Beyan Edilen Amaç

Venoray; prematüre, süt çocukların ve küçük çocukların uzuvlarında damarları bulmak için kullanılan portatif bir LED ışık kaynağıdır.

2

Genel bilgiler



Venoray, poliamid kullanılarak üretilmiştir. Lateks, DEHP ve BPA içermez.

Dezenfektan üreticisinin temizlik talimatına uygun şekilde hafif bir dezenfektan ile temizlenmelidir.

2 adet AAA pil ile çalışır.



Kullanmadan önce işlev bozukluğu ve hasar olup olmadığını kontrol edin.



Sadece klinik kullanım içindir.



Sadece dış uzuvlarda kullanılmalıdır.



Sadece kısa süreli cilt teması için kullanılabilir.



Doğrudan ışık kaynağına bakmayın veya ışığı hastanın kafasına doğrultmayın. Dikkat: Görme yetisinin kısıtlanmasına yol açabilir.



Ürünle ilgili ciddi olayların meydana gelmesi durumunda, lütfen bunları üreticiye ve sorumlu kuruma bildirin.




Steril olmayan tıbbi ürün.



Kuru bir yerde muhafaza edin.

Oda sıcaklığında saklayın.

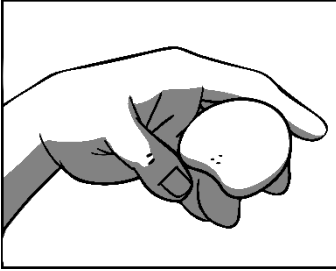

Süt çocuğun elini, Venoray'ın dış kenarındaki LED'lerin üzerine koyun.

Bu aşamada parmaklar kenarda sabitlenebilir.

Başparmak ve işaret parmağı yardımıyla elin arkasındaki deriyi gerdirin.

Bertaraf etme

Boş pilleri, üretici talimatlarına uygun şekilde bertaraf edin.

Arizalı olan cihazları tıbbi atıklarla birlikte bertaraf edin.