

TCmatt NEOsingle TCmatt NEOmulti



Instructions for Use

Suomi

Käyttöohje

TCmatt NEOsingle / Kertakäyttöisen patjan

TCmatt NEOmulti / Uudelleenkäytettävä patja

Tarkoituksenmukainen käyttö

Patjaa käytetään koko kehon lämpötilan säätelyyn potilailla, erityisesti vastasyntyneillä ja imeväisillä. Se liitetään letkusrjalla TECOtherm®-hypo-/hypertermiajärjestelmään, ja sen läpi kierrätetään lämpötilaa säätelevää nestettä. Potilaiden lämpötilan säätelyn tehostamiseksi patja voidaan tarvittaessa kääriä peiteenä kehon ympärille ja kiinnittää kiinnityssilmukoihin hihnoilla.

Varoitukset ja varotoimet



Vain kliniseen käyttöön.



Jos tuotteen käytön yhteydessä esiintyy vakavia vaaratilanteita, ilmoita niistä valmistajalle ja vastaavalle viranomaiselle.



Patjaa saa käyttää ainoastaan TECOtherm®-hypo-/hypertermiajärjestelmän lisävarusteena!



Tämä patja on ainoa patja, jonka TECOtherm®-hypo-/hypertermiajärjestelmän valmistaja on hyväksynyt.



Suoraa kosketusta maton ja potilaan ihon välillä on vältettävä, erityisesti vastasyntyneiden vauvojen kohdalla. Maton päällä on käytettävä vettä hylkivää, klinisesti puhdasta peitelinaa.



Noudata luvussa Puhdistus olevia tuotteen asianmukaista puhdistusta koskevia ohjeita.



Noudata TECOtherm®-hypo-/hypertermiajärjestelmän käyttöohjeessa annettuja ohjeita patjan oikeasta käytöstä!



Pidä etäällä terävistä esineistä vaurioitumisvaaran vuoksi.



Steriloimaton lääkekinnallinen laite.



Patja on kertakäyttötuote! Sitä ei saa käyttää uudelleen eikä valmistella uudelleen käytettäväksi!



Tarkista mahdolliset vauriot ennen käyttöä. Hävitettävä, jos pakkaus on vaurioitunut.

Symbolit



Lääkinnallinen laite



Suojaa auringonvalolta



Valmistaja



Erän nimitys



Käytettävä ennen



Luettelonumero




Varastoi kuivana



Säilytettävä huoneenlämmössä

X	X
	X
	X
	X
X	
X	X
	X
X	
	X
X	
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	
X	
X	X

Käyttö

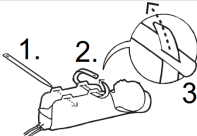

1. Aseta lapsi patjan keskelle. Pujota hihnat patjassa olevien silmukoiden läpi molemmilta puolilta.
2. Vedä hihnojen molemmat päät yhteen niin, että patja kääriytyy lapsen ympärille.
3. Työnnä hihnojen kapeat päät hihnojen toisissa päissä olevien silmukoiden läpi. Vedä hihnan päät kokonaan silmukoiden läpi, kunnes patja on taiteltu yhteen ja kiinnitetty.

Puhdistus

Hygienia- ja uudelleenkäsitelmäyryyksiä on noudatettava kansallisten ja laitoskohtaisten vaatimusten mukaisesti.

Kansallisesti hyväksyttyjä, uudelleenkäsitelyyn soveltuvia, laajakirjoisia pintadesinfiointiaineita on käytettävä.

Puhdista matto ja letkuliitännät ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen nukkaamattomalla liinalla sekä miedolla, värittömällä alkoholipohjaisella ja laajakirjoisella pintadesinfiointiaineella (esim. Bacillol) valmistajan ohjeiden mukaisesti. Poista ensin karkea lika. Toista puhdistusprosessi, jos likaa jää maton ja letkuliitäntöjen pinnoille.

Kertakäyttöinen, älä puhdista patjaa!

Varastointi

Varastoi kuivana ja valolta suojattuna huoneenlämpötilassa.

Hävittäminen

Hävitetään klinisenä jätteenä käyttöään päätyttyä.

Hävitetään kertakäytön jälkeen klinisenä jätteenä.

Tuotteen ominaisuudet

Materiaali:	Polyuretaani
	Polyuretaani / Polyesteri
Tulo-/poisto- letku:	Polyuretaani
Liitäntäpistoke:	Asetaali
Enimmäispaine:	500 mbar
Koko:	44 cm x 72 cm
Tuotenumero ja tuotteen nimi:	642 68 01 / TCmatt NEOmulti
	642 74 01 / TCmatt NEOsingle
Paino:	0.21 kg



Distributor
LOGO

Ihren zuständigen Distributor finden sie Online unter:

Your relevant distributor can be found online at:

Вашия дистрибутор можете да намерите онлайн на:

Vašeho distributora najdete online na adrese:

Du finder din distributør online under:

Τον αρμόδιο διανομέα σας θα τον βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Para encontrar su distribuidor online, consulte en:

Oma vastutava turustaja leiuate internetist aadressilt:

Löydät asianomaisen jälleenmyyjän verkosta osoitteesta:

Vous trouverez votre distributeur compétent en allant sur :

Svog odgovornog distributera možete pronaći online na:

Az Ön illetékes forgalmazóját az alábbi internetes oldalon találja:

Il distributore competente per la vostra area è disponibile online all'indirizzo:

Atsakingą gaminio platintoją galite rasti internete adresu:

Jūsu valstī atbildīgais izplatītājs atrodams tīmekļa vietnē:

Uw distributeur vindt u online op:

Du finner din ansvarlige distributør online på:

Swojego dystrybutora mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:

Pode encontrar o seu distribuidor online em:

Puteți găsi online distribuitorul responsabil la adresa:

Vášho distribútora nájdete online na adrese:

Svojega pristojnega distributerja najdete na spletu na naslovu:

Du hittar din ansvariga distributör online på:

Yetkili distribütörünüzü online olarak burada bulabilirsiniz:

يمكنك العثور على الموزع المسؤول الخاص بك عبر الإنترنت على:



tcm.gmbh/en/distribution/



Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal
Deutschland
Tel.: +49 345 120 52 04
www.tcm.gmbh