

TCmatt NEOsingle **TCmatt NEOmulti**



Instructions for Use

Français

Mode d'emploi

TCmatt NEOsingle / Tapis jetable

TCmatt NEOmulti / Tapis réutilisable

Utilisation prévue

Le tapis sert à contrôler la température totale du corps des patients, en particulier des nouveau-nés et des nourrissons. Il est connecté au système d'hypo et d'hyperthermie TECOtherm® NEO via le garniture de tuyau et s'écoule avec du liquide de thermostatisation. Afin d'améliorer la température du patient, un tapis peut être enroulé autour du corps si nécessaire et fermé avec des sangles sur les œillets.

Avertissements et mesures de précaution



Convient à un usage clinique uniquement.



Si des incidents graves se produisent en lien avec le produit, veuillez les signaler au fabricant et aux autorités compétentes.



Le tapis ne doit être utilisé que comme accessoire du système d'hypo et d'hyperthermie TECOtherm® NEO !



Ce tapis est le seul approuvé par le fabricant du système d'hypo et d'hyperthermie TECOtherm®.



Évitez le contact direct entre le tapis et la peau du patient, notamment avec les nouveau-nés. Utilisez un champ stérile et imperméable sur le tapis.



Suivez les recommandations de la partie Nettoyage pour nettoyer soigneusement le produit.



Suivez les instructions d'utilisation du système d'hypo et d'hyperthermie TECOtherm® NEO pour utiliser correctement le tapis !



Tenir à l'écart des objets tranchants, risque de dommages.



Dispositif médical non stérile.



Ce tapis est un produit à usage unique ! Il ne peut pas être recyclé ou utilisé une seconde fois !



Vérifiez qu'il n'y ait pas de dommages avant utilisation, ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Symboles



Dispositif médical



Protéger de la lumière du soleil



Fabricant



Désignation du lot



Utilisable jusqu'au



Numéro de catalogue

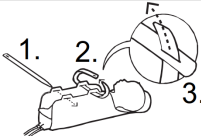


Conserver au sec



Conserver à température ambiante

X	X
	X
	X
	X
X	
X	X
	X
X	
	X
X	
X	
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X

Utilisation	
<div>  <div> <p>1. Placez l'enfant au centre du tapis. Faites passer les sangles des deux côtés dans le tapis à travers les œillets prévus à cet effet.</p> <p>2. Rapprochez les deux extrémités des sangles de façon à ce que le tapis se ferme autour de l'enfant.</p> <p>3. Faites passer la petite extrémité pointue des sangles dans les œillets prévus à cet effet à l'autre extrémité de sangles. Tirez la pointe jusqu'à ce que le tapis soit fermé et fixé.</p> </div> </div>	
Nettoyage	
	Les instructions d'hygiène et de traitement à respecter sont conformes aux directives nationales spécifiques.
	Des désinfectants de surface à large spectre adaptés au traitement et autorisés au niveau national doivent être utilisés.
	Les tapis et les tuyaux de raccordements doivent être nettoyés avant et après chaque utilisation avec un chiffon doux et un désinfectant de surface à large spectre incolore et non-abrasif à base d'alcool (comme le Bacillol), conformément aux instructions du fabricant. Les principales impuretés doivent être éliminées au préalable. Si des impuretés persistent, répétez le processus de nettoyage.
	Usage unique, ne pas nettoyer le tapis !
Stockage	
	Conserver au sec, à l'abri de la lumière, à température ambiante.
Élimination	
	Après utilisation, éliminer comme déchet clinique.
	Après usage unique, éliminer comme déchet clinique.
Caractéristiques du produit	
	Matériau : polyuréthane
	polyuréthane/polyester
	Tuyau d'entrée/ sortie : polyuréthane
	Connecteur : acétal
	Pression maximum : 500 mbar
	Taille : 44 cm x 72 cm
	Référence et nom du produit : 642 68 01 / TCmatt NEOmulti
	642 74 01 / TCmatt NEOsingle
	Poids : 0.21 kg





Distributor
LOGO

Ihren zuständigen Distributor finden sie Online unter:

Your relevant distributor can be found online at:

Вашия дистрибутор можете да намерите онлайн на:

Vašeho distributora najdete online na adrese:

Du finder din distributør online under:

Τον αρμόδιο διανομέα σας θα τον βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Para encontrar su distribuidor online, consulte en:

Oma vastutava turustaja leiuate internetist aadressilt:

Löydät asianomaisen jälleenmyyjän verkosta osoitteesta:

Vous trouverez votre distributeur compétent en allant sur :

Svog odgovornog distributera možete pronaći online na:

Az Ön illetékes forgalmazóját az alábbi internetes oldalon találja:

Il distributore competente per la vostra area è disponibile online all'indirizzo:

Atsakingą gaminio platintoją galite rasti internete adresu:

Jūsu valstī atbildīgais izplatītājs atrodams tīmekļa vietnē:

Uw distributeur vindt u online op:

Du finner din ansvarlige distributør online på:

Swojego dystrybutora mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:

Pode encontrar o seu distribuidor online em:

Puteți găsi online distribuitorul responsabil la adresa:

Vášho distribútora nájdete online na adrese:

Svojega pristojnega distributerja najdete na spletu na naslovu:

Du hittar din ansvariga distributör online på:

Yetkili distribütörünüzü online olarak burada bulabilirsiniz:

يمكنك العثور على الموزع المسؤول الخاص بك عبر الإنترنت على:



tcm.gmbh/en/distribution/



Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal
Deutschland
Tel.: +49 345 120 52 04
www.tcm.gmbh