

TCmatt NEOsingle TCmatt NEOmulti



Instructions for Use

Latviešu

Lietošanas instrukcija

TCmatt NEOsingle / Vienreizlietojamā paklājiņa

TCmatt NEOmulti / daudzreizlietojamais paklājiņš

Paredzētais pielietojums

Paklājiņš ir paredzēts vienmērīgas temperatūras uzturēšanai visām pacientu, īpaši jaundzimušo un zīdaiņu ķermeņa zonām. Izmantotot šļūtenu sistēmu, to savieno ar TECOtherm® – hipo-/hipertermijas sistēmu un nodrošina termoregulācijas šķidruma caurplūdi paklājiņā. Lai uzlabotu vienmērīgas temperatūras saglabāšanu pacienta ķermenī, vajadzības gadījumā paklājiņu var apīt apkārt ķermenim un ar lenču palīdzību noslēgt, izmantojot šim mērķim paredzētās cilpas.

Brīdinājuma norādes un piesardzības pasākumi



Tikai klīniskai lietošanai.



Ja saistībā ar izstrādājumu notiek nopietni negadījumi, lūdz, ziņojiet par tiem ražotājam un atbildīgajām iestādēm.



Paklājiņu drīkst izmantot vienīgi kā TECOtherm® – hipo-/hipertermijas sistēmas piederumu!



Šis paklājiņš ir vienīgais paklājiņš, ko apstiprinājis TECOtherm® hipo-/hipertermijas sistēmas ražotājs.



Jāizvairās no tiešas paklājiņa un pacienta ādas saskares, it īpaši jaundzimušajiem. Uz paklājiņa jālieto ūdeni atgrūdošs, klīniski tīrs pārklājs.



Lūdzu ievērojiet norādes par pareizu izstrādājuma tīrīšanu nodaļā Tīrīšana.



Paklājiņa pareizas lietošanas nolūkā ievērojiet TECOtherm® – hipo-/hipertermijas sistēmas lietošanas instrukciju!



Sargāt no asiem priekšmetiem, bojājumu risks.



Šis nav sterils medicīniskais izstrādājums.



Šis paklājiņš ir paredzēts vienreizējai lietošanai! To nedrīkst atjaunot, kā arī izmantot atkārtoti!



Pirms lietošanas pārbaudīt, vai nav bojājumu; bojāta iepakojuma gadījumā utilizēt Izstrādājumu.

Simboli



Medicīniskais izstrādājums



Aizsargāt no saules stariem



Ražotājs



Partijas nosaukums



Lietojams līdz



Kataloga numurs



Uzglabāt sausā vietā



Uzglabāt istabas temperatūrā



Distributor
LOGO

Ihren zuständigen Distributor finden sie Online unter:

Your relevant distributor can be found online at:

Вашия дистрибутор можете да намерите онлайн на:

Vašeho distributora najdete online na adrese:

Du finder din distributør online under:

Τον αρμόδιο διανομέα σας θα τον βρείτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Para encontrar su distribuidor online, consulte en:

Oma vastutava turustaja leiuate internetist aadressilt:

Löydät asianomaisen jälleenmyyjän verkosta osoitteesta:

Vous trouverez votre distributeur compétent en allant sur :

Svog odgovornog distributera možete pronaći online na:

Az Ön illetékes forgalmazóját az alábbi internetes oldalon találja:

Il distributore competente per la vostra area è disponibile online all'indirizzo:

Atsakingą gaminio platintoją galite rasti internete adresu:

Jūsu valstī atbildīgais izplatītājs atrodams tīmekļa vietnē:

Uw distributeur vindt u online op:

Du finner din ansvarlige distributør online på:

Swojego dystrybutora mogą Państwo znaleźć w Internecie pod adresem:

Pode encontrar o seu distribuidor online em:

Puteți găsi online distribuitorul responsabil la adresa:

Vášho distribútora nájdete online na adrese:

Svojega pristojnega distributerja najdete na spletu na naslovu:

Du hittar din ansvariga distributör online på:

Yetkili distribütörünüzü online olarak burada bulabilirsiniz:

يمكنك العثور على الموزع المسؤول الخاص بك عبر الإنترنت على:



tcm.gmbh/en/distribution/



Tec Com Medizintechnik GmbH
Am Krümmling 1
06184 Kabelsketal
Deutschland
Tel.: +49 345 120 52 04
www.tcm.gmbh